




DR. SCHUMACHER

DESCOCEPT® AF LEMON

**Schnelldesinfektion und Reinigung von
Medizinprodukten gem. MPG sowie
Flächen gem. Biozid-Richtlinie**

- mit Limonenduft -

**aldehydfrei
phenolfrei
dermatologisch getestet
DGHM/VAH/ÖGHMP-gelistet**

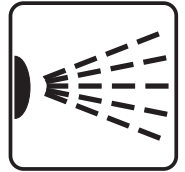

CE 0482

Präparatetyp

DESCOCEPT AF LEMON ist eine gebrauchsfertige, **aldehydfreie Schnelldesinfektion** auf der Basis von Ethanol und quartären Ammoniumverbindungen.

DESCOCEPT AF LEMON hat einen angenehmen, **frischen Duft** und eine **gute Hautverträglichkeit**. Auf Grund der aldehydfreien Formulierung sind Verfärbungen nach Anwendung von **DESCOCEPT AF LEMON** nahezu ausgeschlossen.

Umfangreiche Wirksamkeit gegenüber Viren- auch wirksam gegen **Norwalk-like-Viren**.

Als Flächendesinfektionsmittel in allen Bereichen, wo eine schnelle Desinfektion gebraucht wird. Geeignet für:

- ärztliche und zahnärztliche Praxen, wo eine schnelle Desinfektion erforderlich ist (z.B. **Behandlungsstühle**, auch Hand- und Winkelstücke)
- Augenärztliche Praxen und Optiker zur Vorbeugung von viralen Infektionen
- Schnelldesinfektion von OP-Inventar und Operationstischen zwischen den Operationen
- Bettgestelle, Matratzen, Decken und Kissen
- Transportmittel wie Krankentransportfahrzeuge, Notarztwagen, Müllentsorgungsfahrzeuge und Transportkörbe
- allgemeines Mobiliar wie Untersuchungsliegen, Verbandswagen, Badewannen und Toilettensitze
- Bekleidung wie Kittel, OP-Schuhe, Gummischürzen und Wäsche

DESCOCEPT AF LEMON erfüllt die gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit gem. TRGS 525/540.

Anwendungsbereiche

Gem. MPG: Zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten.

Gem. Biozidrichtlinie: Zur Schnelldesinfektion und -reinigung von alkoholbeständigem medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art. Besonders für unzugängliche Flächen geeignet.

Anwendung

Flächen und Gegenstände mit **DESCOCEPT AF LEMON** aus mindestens 30 cm Abstand bis zur vollen Benetzung besprühen, nach Ablauf der Einwirkzeit mit Einmaltuch nachwischen. Zur Vermeidung von starker Raumluftbelastung durch Alkohol (Exschutz) **DESCOCEPT AF LEMON** in ein Einmaltuch sprühen und die Flächen bei entsprechender Benetzung abwischen.

DESCOCEPT AF LEMON hat praktisch keine Belagsbildung zur Folge.

Mikrobiologie und Einwirkzeiten

DESCOCEPT AF LEMON wirkt:

bakterizid incl. **Tbc, MRSA**

fungizid

virusinaktivierend (**HBV/HIV, HCV, BVDV, Rota-, Adeno-, Vakzinia-Viren, Noro-/Norwalk-Like-Viren**)

Einwirkzeit gem. neuer DGHM/VAH-Richtl. 09/2001 : konz.- 1 Min.*

(*gelistet in der 5-Min.-Spalte der DGHM/VAH)

Behüllte Viren wie Vakzinia, BVDV, HBV,

HIV, HCV:

konz. - 30 sec.

Tbc:

konz.- 1 Min.

Rota/Adeno-Viren:

konz.- 1 Min.

Noro-/ Norwalk-like-Viren (FCV):

konz.- 15 Min.

Zusammensetzung

42,0 g Ethanol, 0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid in 100 g Lsg.

Chemisch-Physikalische Daten

Aussehen des Konzentrates: klare, farblose Lösung

pH-Wert: 7,0 +/- 1,0

Flammpunkt nach DIN 51 755: 25,0 °C

Besondere Hinweise

Entzündlich. Flammpunkt nach DIN 15755: 25 °C. Nicht auf offene oder stromführende Teile oder in offene Flammen bringen. Bei Kontakt mit den Augen gründlich mit Wasser spülen, ggf. Arzt aufsuchen.

Ausbringung max. 50 ml pro m². Die ausgebrachte Gesamtmenge pro Raum darf nicht mehr als 100 ml m² Raumgrundfläche betragen. Behälter dicht geschlossen halten! Nicht rauchen. Von Zündquellen fernhalten!

Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Nicht einnehmen!

Desinfektionsmittel sicher verwenden.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Lieferformen

Einzelpackung	Verpackungseinheit	PZN	Art.-Nr.
1 Liter Flasche	10 x 1 Liter	0792283	00.311L.010
5 Liter Kanister	3 x 5 Liter	0792308	00.311L.050
10 Liter Kanister	1 x 10 Liter	0792314	00.311L.100

Dosierhilfen

250-ml-Sprühflasche, Sprühkopf für 500-ml und 1-Liter-Flasche, Kanisterumfüllhahn, Kanisterschlüssel.

Gutachten

Daten beziehen sich auf **DESCOCEPT AF**:

Prof. Dr. Schubert, Hygieniker, Frankfurt:
Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM/VAH-Richtl., 27.11.2000.

Prof. Dr. Wille / Dr. Färber, Hygieniker, Gießen:
Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM/VAH-Richtl., 03.08.2005.
Ergänzungsgutachten zur Flächendesinfektion gem. neuen DGHM/VAH-Richtl. 9/2001 vom 08.12.2003.

O.Univ.-Prof.Dr. Rotter, Dip.Bact.(London), Wien:
Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM/VAH-Richtl., 28.02.2006.

Dr. Steinmann, Virologe, Bremen:
Adeno-Viren, 03.05.2001; FCV (Noro Viren), 04.04.05; Vakzinia, 12.12.2005; BVDV, 12.12.2005.

Prof. Dr. Werner, Hygieniker, Schwerin:
Gutachten zur tuberkuloziden Wirksamkeit, 12.04.1999.

Dermatest, Münster:
Fachärztliches, dermatologisches Gutachten (Epikutantest), 26.05.2000.

Konrad Hornschuch AG:
Desinfektionsmittelempfehlung bzgl. **DESCOCEPT AF** zur Anwendung an skai- Polstermaterialien, 09.08.2005.

Dr. Brill, Hygieniker, Hamburg:
Prüfung der mikrobiologischen Stabilität von **DESCOCEPT AF** im Desco Wipes System vom 08.11.2006.

Listung

DESCOCEPT AF wurde aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste der DGHM/VAH.

© Dr. Schumacher GmbH js/kk/120107