



DR. SCHUMACHER

DESCOCEPT® AF

**Schnelldesinfektion von
Medizinprodukten gem. MPG sowie
Flächen gem. Biozid-Richtlinie**

Präparatetyp

DESCOCEPT AF ist eine gebrauchsfertige, **aldehydfreie Schnelldesinfektion** auf der Basis von Ethanol und quartären Ammoniumverbindungen.

DESCOCEPT AF hat einen angenehmen, **frischen Duft** und eine **gute Hautverträglichkeit**. Auf Grund der aldehydfreien Formulierung sind Verfärbungen nach Anwendung von **DESCOCEPT AF** nahezu ausgeschlossen.

Umfangreiche Wirksamkeit gegenüber Viren- auch wirksam gegen **Norwalk-like-Viren**.

Als Flächendesinfektionsmittel in allen Bereichen, wo eine schnelle Desinfektion gebraucht wird. Geeignet für:

- ärztliche und zahnärztliche Praxen, wo eine schnelle Desinfektion erforderlich ist (z.B. **Behandlungsstühle**, auch Hand- und Winkelstücke)
- Augenärztliche Praxen und Optiker zur Vorbeugung von viralen Infektionen
- Schnelldesinfektion von OP-Inventar und Operationstischen zwischen den Operationen
- Bettgestelle, Matratzen, Decken und Kissen
- Transportmittel wie Krankentransportfahrzeuge, Notarztwagen, Müllentsorgungsfahrzeuge und Transportkörbe
- allgemeines Mobiliar wie Untersuchungsliegen, Verbandswagen, Badewannen und Toilettensitze
- Bekleidung wie Kittel, OP-Schuhe, Gummischürzen und Wäsche

DESCOCEPT AF erfüllt die gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit gem. TRGS 525/540.

Anwendungsbereiche

Gem. MPG: Zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten.

Gem. Biozidrichtlinie: Zur Schnelldesinfektion und -reinigung von alkoholbeständigem medizinischen Inventar sowie Flächen aller Art. Besonders für unzugängliche Flächen geeignet.

Anwendung

Flächen und Gegenstände mit **DESCOCEPT AF** aus mindestens 30 cm Abstand bis zur vollen Benetzung besprühen, nach Ablauf der Einwirkzeit mit Einmaltuch nachwischen. Zur Vermeidung von starker Raumluftbelastung durch Alkohol (Exschutz) **DESCOCEPT AF** in ein Einmaltuch sprühen und die Flächen bei entsprechender Benetzung abwischen.

DESCOCEPT AF hat praktisch keine Belagsbildung zur Folge.

Mikrobiologie und Einwirkzeiten

DESCOCEPT AF wirkt:

bakterizid incl. **Tbc, MRSA**

fungizid

viruinaktivierend (**HBV/HIV, HCV, BVDV, Rota-, Adeno-, Vakzinia-Viren, Noro-/Norwalk-Like-Viren**)

Einwirkzeit gem. neuer DGHM/ÖGHMP/VAH-Richtl.: **konz. 1 Min.***
(*gelistet in der 5-Min.-Spalte der DGHM/VAH)

Behüllte Viren wie Vakzinia, BVDV, HBV,

HIV, HCV (begrenzt viruzid):

Tbc:

Rota/Adeno-Viren:

Noro-/ Norwalk-like-Viren (FCV):

konz. - 30 sec.


konz.- 1 Min.

konz.- 1 Min.

konz.- 15 Min.

- auch mit **LEMON-Duft** erhältlich -

aldehydfrei
phenolfrei
DGHM/VAH-gelistet
ÖGHMP-gelistet
dermatologisch getestet

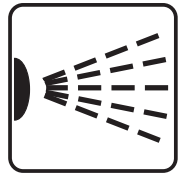

CE 0482

Zusammensetzung

42,0g Ethanol, 0,05g Didecyldimethylammoniumchlorid in 100 g Lsg.

Chemisch-Physikalische Daten

Aussehen des Konzentrates: klare, farblose Lösung
pH-Wert: 7,0 +/- 1,0
Flammpunkt nach DIN 51 755: 25,0 °C

Besondere Hinweise

Entzündlich. Flammpunkt nach DIN 15755: 25 °C. Nicht auf offene oder stromführende Teile oder in offene Flammen bringen. Bei Kontakt mit den Augen gründlich mit Wasser spülen, ggf. Arzt aufsuchen. Ausbringung max. 50 ml pro m². Die ausgebrachte Gesamtmenge pro Raum darf nicht mehr als 100 ml m² Raumgrundfläche betragen. Behälter dicht geschlossen halten! Nicht rauchen. Von Zündquellen fernhalten! Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Nicht einnehmen! Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Lieferformen

Einzelpackung	Verpackungseinheit	PZN	Art.-Nr.
500 ml Flasche	10 x 500 ml	0792277	00.311.005
1 Liter Flasche	10 x 1 Liter	0792283	00.311.010
5 Liter Kanister	3 x 5 Liter	0792308	00.311.050
10 Liter Kanister	1 x 10 Liter	0792314	00.311.100

Dosierhilfen

250-ml-Sprühflasche, Sprühkopf für 500-ml und 1-Liter-Flasche, Kanisterumfüllhahn, Kanisterschlüssel.

Gutachten

Prof. Dr. Schubert, Hygieniker, Frankfurt:

Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM/VAH-Richtl., 27.11.2000.

Prof. Dr. Wille / Dr. Färber, Hygieniker, Gießen:

Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM/VAH-Richtl., 03.08.2005.

O.Univ.-Prof.Dr. Rotter, Dip.Bact.(London), Wien:

Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM/VAH-Richtl., 28.02.2006.

Dr. Steinmann, Virologe, Bremen:

Gutachten zur Wirksamkeit gegenüber: Adeno-Viren, 03.05.2001; FCV (Noro Viren), 04.04.05; Vakzinia, 12.12.2005; BVDV, 12.12.2005.

Prof. Dr. Werner, Hygieniker, Schwerin:

Gutachten zur tuberkuloziden Wirksamkeit, 12.04.1999.

Dermatest, Münster:

Fachärztliches, dermatologisches Gutachten (Epikutantest), 26.05.2000.

Konrad Hornschuch AG:

Desinfektionsmittelempfehlung bzgl. **DESCOCEPT AF** zur Anwendung an skai- Polstermaterialien, 09.08.2005.

Dr. Brill, Hygieniker, Hamburg:

Prüfung der mikrobiologischen Stabilität von **DESCOCEPT AF** im Desco Wipes System vom 08.11.2006.

Listung / Zertifizierung

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste der DGHM/VAH. Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste der ÖGHMP. Registriert als Biozid-Produkt bei der baw (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidgesetz; baw Reg.-Nr.: N - 20338.

© Dr. Schumacher GmbH js/kk/081206