



DR. SCHUMACHER

DESCO WIPES DT KLEIN

**Vliestücher zur Tränkung mit
Flächendesinfektionsmitteln**

Präparatetyp

Trockene Wischtücher zur Tränkung mit Desinfektionsmitteln zur schnellen und unkomplizierten Desinfektion und Reinigung von Flächen und Medizinprodukten. Die Tücher sind aus qualitativ hochwertigem, fussselfreiem Vliesstoff.

Sie können sowohl in Kombination mit gebrauchsfertigen Schnell-desinfektionsmitteln als auch mit der gebrauchsfertigen Anwendungslösung von Desinfektionsmittelkonzentraten verwendet werden.

DESCO WIPES DT KLEIN wurden **speziell für die Flächendesinfektion entwickelt**. Sie geben die Desinfektionslösung hervorragend ab und gewährleisten eine einwandfreie Benetzung der zu desinfizierenden Fläche.

DESCO WIPES DT KLEIN können aus einem eigens dafür konzipierten **DESCO WIPES FEUCHTTUCHSPENDER** entnommen werden. Die Entnahme erfolgt aus einem sehr praktikablen, wiederverschließbaren Spendersystem. Die Anwendungslösung wird somit durch das geschlossene System vor externer Kontamination und Verdunstung geschützt.

Anwendungsbereiche

DESCO WIPES DT KLEIN können zur Flächendesinfektion und Reinigung in allen Bereichen von medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen und Arztpraxen; der pharmazeutischen Industrie; in Labors sowie in der Lebensmittelindustrie und Küchen angewendet werden.

Sie sind besonders geeignet für:

- patientennahe Flächen wie Nachttische, Betten und Patientenliegen
- alle Arbeitsflächen
- Einsatzorte, an denen kein Wasseranschluß zur Verfügung steht oder eine hygienische Aufbereitung von Reinigungsutensilien nicht möglich ist
- schwer zugängliche Flächen

Anwendung

1,0 – 1,5 Liter gebrauchsfertige Anwendungslösung des gewünschten Desinfektionsmittels herstellen (Anwendungskonzentrationen und Einwirkzeit den Herstellerangaben entnehmen). Anschließend erfolgt die Tränkung der Tücher im Spendereimer mit 1,0 – 1,5 Litern der Gebrauchslösung des Desinfektionsmittelkonzentrats oder des gebrauchsfertigen alkoholischen Desinfektionsmittels.

Es dauert 30-60 Minuten bis alle Tücher vollständig getränkt sind. Flächen und Gegenstände sorgfältig abwischen. Einwirkzeit des Desinfektionsmittels beachten!

Die **Standzeit** wurde für unsere Flächendesinfektionsmittelkonzentrate in den von der DGHM/ÖGHMP empfohlenen Konzentrationen untersucht. Zu dem wurde die Standzeit unserer gebrauchsfertigen alkoholischen Schnell-desinfektionsmitteln untersucht. Die Standzeiten betragen jeweils mindestens 28 Tage.

Neben den Flächendesinfektionsmitteln von Dr. Schumacher können **DESCO WIPES DT KLEIN** auch mit Produkten anderer Hersteller kombiniert werden.

DESCO WIPES DT KLEIN Tücher sind einzeln abreißbar und sollten einzeln aus der Applikationsöffnung entnommen werden. Nachfolgende Tücher sind durch die große Auffangschale mit Deckel des Spendersystems sicher geschützt.

Spezielle Etiketten, die die Dokumentation von Charge, Ansatz- und Verfalldatum des entsprechenden Desinfektionsmittels erleichtern, sind als zusätzliche Hilfsmittel erhältlich.

trockene Wischtücher



CE

Zusammensetzung

1 Rolle besteht aus 90 Wischtüchern à 25 cm x 25 cm, trocken, aus hochqualitativem, fussselfreiem Spunlace-Lochvlies. 100% Kunstfaser-Mischung.

Lieferformen

Packungsgröße	Verk.-Einheit	Art.-Nr.
1 Packung DESCO WIPES DT KLEIN Rolle à 70 Blatt	3 x 1 Rolle	00-915-RD7003

Gutachten

Dr. Brill, Hygieniker, Hamburg:

Prüfung der mikrobiologischen Stabilität von **CLEANISEPT**, **BIGUANID FLÄCHE N**, **DESCOCEPT AF**, **DESCOCEPT PUR** im Desco Wipes System vom 08.11.2006.

Wirksamkeit des Desco Wipes Tüchersystems im quantitativen Flächenversuch mit OP-Fliesen bei Einsatz von **CLEANISEPT**, **BIGUANID FLÄCHE N** vom 08.11.2006.

Desinfizierende Wirkung des Vliesstoffes Desco Wipes DT in Kombination mit **DESCOCEPT PUR**, **DESCOCEPT AF** vom 21.03.2007. Desinfizierende Wirkung des Vliesstoffes Desco Wipes DT in Kombination mit den Produkten Desomed Rapid AF sowie Biguamed Perfekt N der Firma Desomed Dr. Trippen GmbH vom 21.03.2007 und 12.06.2007. Prüfung der mikrobiologischen Stabilität von Desomed Rapid AF, Biguamed Perfekt N im Desco Wipes System vom 12.06.2007.

B.Braun Melsungen AG:

Stellungnahme zur Kompatibilität von B.Braun-Flächendesinfektionsmitteln in Verbindung mit Desco Wipes vom 23.04.2007.

DESCO WIPES CE FEUCHTTUCHSPENDER KLEIN

wiederverschließbarer Tuchspendereimer

Präparatetyp

Ein speziell für die Herstellung, hygienische Aufbewahrung und Entnahme der feuchten Tücher konzipierter Spendereimer aus Polyethylen und Polypropylen. Die Entnahme erfolgt aus einem speziell für diese Anwendung konzipierten, absolut dichten, wiederverschließbaren Tuchspendersystem.

Spülmaschinenfest bis 60° C.

Ein spezielles Etikett, welches die Dokumentation von Charge, Ansatz- und Verfalldatum erleichtert, ist beigegefügt.

Lieferformen

Packungsgröße	Verk.-Einheit	Art.-Nr.
Einzelpackung DESCO WIPES SPENDERSYSTEM KLEIN	1 x 1 Eimer	00-915-EK004
DESCO WIPES SPENDERSYSTEM KLEIN 6 Spendereimer	6 x 1 Eimer	00-915-EK005

© Dr. Schumacher GmbH Js/kk/250707